



**Baby Comp** srl  
da 30 anni  
al servizio della donna  
nel rispetto della sua ciclicità

## LADY-COMP




### Cosa sono i Lady-Comp

Proposti in 3 versioni (basic, lady e baby) i Lady-Comp – prodotti in Germania dalla Valley Electronics e distribuiti in esclusiva per l'Italia dalla Baby Comp srl – sono gli strumenti computerizzati per il controllo del ciclo e della fertilità giornaliera della Donna – innovativi, semplici da usare e tecnologicamente avanzati – che se usati per la contraccezione naturale garantiscono un'affidabilità del 99,3% (testata clinicamente).

### Perché 3 modelli?:


Perché le esigenze della Donna possono differire.

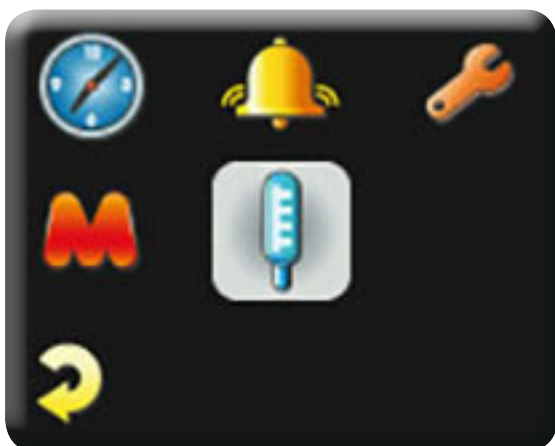

### Lady-Comp Basic

ha le funzioni "base" per il controllo giornaliero dello stato di fertilità della Donna e, generalmente, viene scelto per la sola contraccezione naturale.

Verde = NON fertile con un'affidabilità del 99,3%

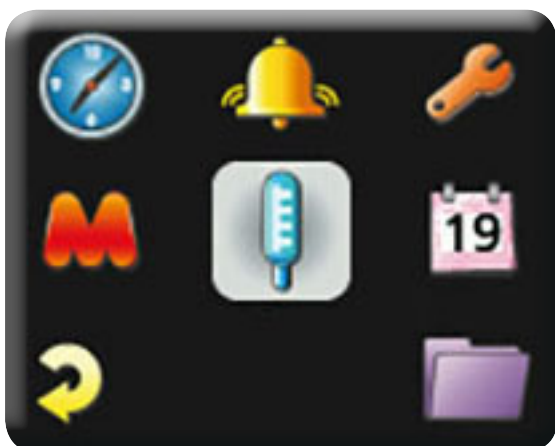

### Lady-Comp

rispetto al modello basic indica in più, direttamente sul Display dell'apparecchio, le statistiche del ciclo della Donna; utili soprattutto per il monitoraggio della regolarità del ciclo, dell'ovulazione e dell'equilibrio ormonale.



## Lady-Comp baby

è il dispositivo per la pianificazione familiare naturale più completo. Oltre che per la contraccezione e il controllo del ciclo e dell'ovulazione della Donna, ha delle funzioni specifiche di aiuto alla procreazione mirata di una gravidanza (utili anche in caso di ridotta fertilità maschile)

In questa pagina del sito [www.babycomp.it](http://www.babycomp.it) è pubblicata una tabella con [le indicazioni dei Dispositivi Lady-Comp a confronto](#)

## Con quali finalità è nato Lady-Comp?

Nella seconda metà degli anni '80 un team di ginecologi, informatici e biomatematici tedeschi, guidati dal dottor Hubertus Rechberg, si è impegnato nello sviluppo di una soluzione tecnologicamente avanzata per la contraccezione naturale che fosse priva di controindicazioni per la salute e il benessere psicofisico della donna, che però avesse la stessa sicurezza di quella ormonale. L'obiettivo era, quindi, superare il dilemma della scelta tra salute e sicurezza.


Da un lato vi erano, infatti, i metodi naturali, complicati e poco sicuri, dall'altro la pillola, di cui sono noti gli effetti collaterali e gli squilibri ormonali che comporta.

Una donna in età fertile può rimanere incinta mediamente circa 6 giorni per ciclo: è assurdo che per evitarlo con sicurezza si debbano assumere tutti i giorni, per anni, contraccettivi che gravano pesantemente sulla sua salute e che hanno anche un notevole impatto ambientale; infatti gli ormoni scaricati nelle acque bypassano gli impianti di depurazione cittadini.

La strada scelta dal dottor Rechberg è stata di partire da uno dei metodi naturali esistenti, quello della temperatura basale, e grazie alla moderna tecnologia sviluppare un hardware e un software (con il supporto di esperti di regolazione naturale della fertilità) che fosse semplice da usare e sicuro nei risultati.



Sin dalla sua 1° versione l'apparecchio Baby-Comp e il suo software, presentato dalla Valley Electronics nel 1987 ha dimostrato, attraverso studi clinici, di saper distinguere con affidabilità i giorni non fertili del ciclo della donna da quelli fertili.

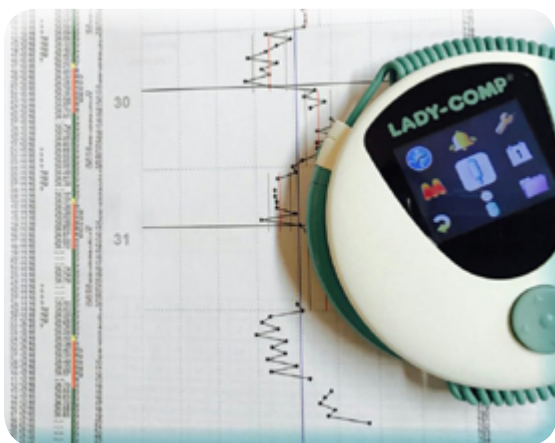


Da allora costantemente migliorato e perfezionato, il primo indicatore di fertilità computerizzato Baby Comp è stato in seguito affiancato da altri modelli tra cui Lady-Comp.

Quelli di ultima generazione (nati nel 2015) rispetto ai modelli precedenti sono più piccoli e versatili e offrono la possibilità di stampare i dati memorizzati nell'apparecchio in autonomia; di modo da poter dare al ginecologo un prezioso supporto di monitoraggio del ciclo della Donna, nel lungo periodo.

Questo ovviamente torna particolarmente utile quando la coppia è alla ricerca della gravidanza e si presentano delle difficoltà.

### Quali sono i fondamenti medico-scientifici del ciclo ormonale?

Una donna in età fertile può rimanere incinta mediamente circa 6-7 giorni per ciclo: 5 prima dell'ovulazione (tenendo conto che gli spermatozoi dell'uomo, all'interno del corpo della donna, possono trovare le condizioni per mantenere una capacità fecondativa fino ad un massimo di 120 ore = 5 giorni). Dopo l'ovulazione l'ovulo può venire concepito per 18 ore al massimo e se accade che vi siano due o più ovulazioni, ciò avviene sempre entro 24 ore. Da ciò la determinazione della finestra fertile del ciclo che sarà di minimo 7 giorni.

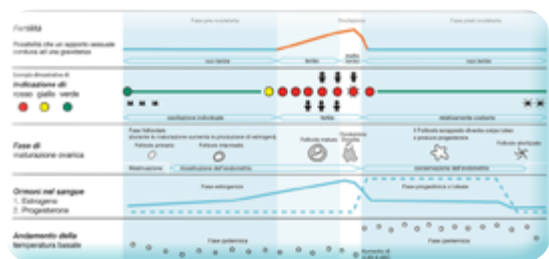

### Lady-Comp, come si utilizza e come funziona?

E' molto semplice da usare e non richiede nessuna conoscenza di informatica né di computer. I dati memorizzati e analizzati per stabilire l'esatto momento dell'ovulazione sono: il **dato mestruale** (memorizzato una volta al mese) e la **temperatura basale**, rilevata in modo sub-linguale con un apposito termistore (con precisione al centesimo di grado) contenuto nell'apparecchio.

L'operazione dura circa 1 minuto - [link al video](#) - e un segnale acustico ne segnala il completamento. Gli apparecchi memorizzano i dati, conservandoli per anni, calcolano i valori medi delle temperature nelle diverse fasi del ciclo, compiono una serie di calcoli statistici, biomatematici e di comparazioni, per scartare automaticamente quelli non attendibili (per esempio uno stato febbrile).

Il risultato di questa analisi, che tiene conto anche della capacità fecondativa degli spermatozoi (120 ore al massimo, all'interno del corpo della donna) è un'indicazione in tempo reale, valida per le 24 ore successive, che segnala in rosso i giorni fertili e in verde quelli non fertili.



## Quanti sono mediamente i giorni fertili segnalati?

Il numero dei giorni fertili (rossi) varia da donna a donna e può cambiare da un ciclo all'altro: in media una donna con cicli regolari ne ha 7-8, se invece l'ovulazione ritarda di 2 giorni ne avrà, a garanzia della sicurezza contraccettiva, 2 in più. Un'irregolarità del ciclo o l'omissione per più giorni della misurazione possono comportare, per il ciclo in corso, un maggior numero di giorni rossi, ma resta inalterata la sicurezza contraccettiva dei giorni riconosciuti come NON fertili, indicati con il VERDE.



## Qual è il grado di sicurezza contraccettiva di Lady-Comp?

Le indicazioni fornite dall'apparecchio sono attendibili sin dal primo giorno per tutti i modelli e per qualsiasi donna, anche con cicli irregolari.

Il software BabyComp installato su Lady-Comp è stato sottoposto a molteplici test clinici (disponibili [sul nostro sito](#)) che ne attestano una sicurezza contraccettiva del 99,3%, con indice Pearl dello 0,7.

Questi dati li pongono ai primi posti in assoluto, con valori analoghi a quelli della pillola e migliori di altri metodi di riconosciuta efficacia, come la spirale.

FOTO PubMed e [link all'articolo](#)

## Distribuzione:

E' possibile acquistare Lady-Comp sia direttamente presso la nostra società con ordine telefonico che online, nello shop del sito: [www.babycomp.it](http://www.babycomp.it)